

## DESCRIPCIÓN

Desinfectante concentrado formulado para la desinfección general estricta, incluida la médica, y de mantenimiento en todo tipo de entornos de trabajo.

## INDICACIONES DE USO

Desinfectante concentrado de amplio espectro especialmente formulado para la prevención y control de microorganismos (virus, bacterias, hongos, etc) en superficies de uso Ambiental e Higiene Alimentaria.

## MODO DE EMPLEO

- Antes de usar léase detenidamente la etiqueta.
- No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la actividad bactericida y fungicida/levuricida de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad.
- Cumple la Norma UNE-EN 14476 en condiciones limpias, a una concentración de 5%, con 15 min de contacto y 20°C. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad virucida en medicina.

- Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinaria o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente con el productos STERILEX GAMMA, no contengan residuos de ninguno de sus componentes. Para ello, deberá aclararse con agua potable las partes tratadas antes de su utilización.
- La aplicación en la Industria Alimentaria para uso en desinfección de contacto de superficies y equipos, habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos.
- No mezclar con otros productos químicos.
- A fin de evitar riesgos para las persona y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
- Se deberán aclarar con agua de consumo las superficies tratadas o expuestas que vayan a estar en contacto con las personas.
- Cumple la Norma UNE-EN 14476 en condiciones limpias, a una concentración de 0,5%, con 15 min de contacto y 20°C para fines específicos con los microorganismos de ensayo *Adenovirus* tipo 5 y *Norovirus murino*.

Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipoclorito. Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones (latón, bronce, etc.) Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto con los materiales.

## Modo de empleo:

Desinfección de contacto:  
Superficies y equipos mediante pulverización, bayeta o inmersión con el producto diluido en agua, respetando los tiempos de contacto.  
Antes de la aplicación deberá realizarse una limpieza profunda.

Uso por personal profesional y profesional especializado

# STERILEX GAMMA

Cloruro de didecildimetilamonio \_\_\_\_\_ 4,50%  
Monoetanol amina y excipientes c.s.p. \_\_\_\_\_ 100,00%

Desinfectante concentrado para el control microbiológico en uso Ambiental e Higiene Alimentaria



DTS OABE S.L.  
Pol. Industrial Zabale Parc. 3  
48410 Orozko (Vizcaya)  
Teléfono: 94 633 06 55  
<https://www.dts-oabe.com>